

Procédure de nettoyage et de stérilisation des embouts



Les embouts de scanner MEDIT doivent être nettoyés et stérilisés entre chaque patient.

Après avoir utilisé la pointe du scanner, nettoyez-la immédiatement avec de l'eau savonneuse et une brosse. MEDIT recommande l'utilisation d'un liquide vaisselle doux.

La pointe du scanner doit être également nettoyée manuellement avec une solution désinfectante. Après le nettoyage et la désinfection, vérifiez que le miroir à l'intérieur de la pointe du scanner ne présente pas de taches ou de coulures.

Si nécessaire, répétez le processus de nettoyage et de désinfection et à l'aide d'une serviette en papier séché délicatement le miroir.

Insérez la pointe du scanner dans une pochette de stérilisation en papier et fermez-la hermétiquement pour assurer l'étanchéité à l'air. Utilisez une pochette thermoscellée ou autocollante.

Dans un autoclave, stérilisez la pointe du scanner emballée dans les conditions suivantes :

- Autoclave à gravité > Stériliser pendant 30 minutes à 121 °C (249,8 °F) et sécher pendant 15 minutes.
- Autoclave à gravité > Stériliser pendant 10 minutes à 135 °C (275 °F) et sécher pendant 30 minutes.
- Autoclave de type pré-vide > Stériliser pendant 4 minutes à 134 °C (273,2 °F) et sécher pendant 20 minutes.

Avant d'ouvrir l'autoclave, utilisez un programme pour sécher la pointe enveloppée du scanner.

Les pointes du scanner peuvent être restérilisées jusqu'à 150 fois avant d'être jetées comme indiqué dans le guide d'élimination.

Les temps et les températures d'autoclavage peuvent différer selon le type et le fabricant de l'autoclave. Par conséquent, le nombre d'utilisation peut être inférieur. Pour déterminer si les conditions requises sont remplies, veuillez consulter le manuel d'utilisation du fabricant de l'autoclave que vous utilisez.

Les embouts de scanner propres, désinfectés et stérilisés doivent rester stériles jusqu'à ce qu'ils soient utilisés sur un patient.

MEDIT n'est pas responsable des dommages, tels que la déformation de la pointe du scanner qui se produit lors des opérations de nettoyage, de désinfection ou de stérilisation qui ne respectent pas ses directives (consulter le mode d'emploi fourni avec les embouts).

Avertissement

Des impuretés ou des taches sur le miroir de la pointe du scanner peuvent entraîner une baisse de qualité de la numérisation ou une expérience de numérisation globalement médiocre. Dans ce cas, nettoyez le miroir en suivant les étapes décrites ci-dessous :

1. Retirez la pointe du scanner du scanner
2. Utilisez un chiffon propre ou un coton-tige imbibé d'alcool pour essuyer le miroir. Si vous n'utilisez pas d'alcool pur, le miroir peut être taché. L'éthanol ou le propanol (alcool éthylique/propylique) sont deux options acceptables.
3. À l'aide d'un chiffon sec et non pelucheux, essuyez le miroir.
4. Examinez le miroir pour la poussière et les fibres. Répétez la procédure de nettoyage si nécessaire.