

⚙️ VITA Paramètres de post-traitement Form Cure 2

			
		Printed denture base	
Teeth		VITA VIONIC® DENT RESIN	
Bonding material		VITA VIONIC® BASE RESIN	
Bonding gap	150 µm		



VITA VIONIC® BASE RESIN IMPACT

Nettoyage de
dégrossissement



► 3 minutes

Nettoyage en
profondeur



► 3 minutes

Paramètres de Post-traitement avec formlabs Form Cure 2ème
génération :

Material	Color	Parameter / no heating
VITA Vionic Base	All	2 min
VITA Vionic Dent	All	2 min
VITA Vionic TryIn	All	2 min
VITA Vionic Base Resin flex	All	3 min

